

BAPSCARCARE T Instrukcja stosowania

Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T. Samoprzylepny (adhezyjny), cienki i przezroczysty medyczny opatrunek wykonany z silikonu do leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (blizny przerostowe i keloidowe).

Opis produktu

BAPSCARCARE T to zestaw opatrunków silikonowych do leczenia starych i nowych blizn (również rozległych). Ze względu na swoją elastyczność i właściwości adhezyjne opatrunek BAPSCARCARE T pozostaje na swoim miejscu na dowolnej części ciała. Może być stosowany pod ubraniem.

Skład

Folia poliuretanowa, medyczny żel silikonowy

Właściwości

BAPSCARCARE T sprawia, że blizny stają się bardziej płaskie, mniej widoczne i cieńsze. Pomaga też zmniejszyć dolegliwości (takie jak trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne).

Opatrunek zapewnia okluzyjne środowisko, dodatkowo nawilżając naskórek (powierzchniową warstwę skóry). Zwiększone nawilżanie sprawia, że uszkodzona tkanka goi się szybciej a dolegliwości towarzyszące ulegają złagodzeniu.

Wskazania do stosowania

Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T stosuje się w leczeniu starych i nowych blizn. Jest wskazany do:

- Leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (przerostowym i keloidowym)
- Leczenia blizn po oparzeniach
- Leczenia blizn pooperacyjnych
- Leczenie trwałych dolegliwości funkcjonalnych (trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, świąd, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne)

Instrukcja stosowania

Rozpoczęcie leczenia

Zalecane jest stopniowe przedłużanie czasu stosowania opatrunku w okresie pierwszego tygodnia do osiągnięcia 24 godzin na dobę, aby skóra stopniowo się przyzwyczaiła do opatrunku. Aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny zaleca się noszenie opatrunku silikonowego codziennie tak długo, jak to możliwe.

Przed zastosowaniem

- Dokładnie oczyścić a następnie osuszyć bliznę i skórę sąsiadującą.
- Wyjmij produkt z opakowania.
- W razie potrzeby opatrunek silikonowy można dociąć dożądanego rozmiaru.

- Upewnij się, że opatrunek obejmuje całą bliznę i obszar około 2 cm zdrowej skóry.
- Depilacja okolicy blizny przed aplikacją sprzyja lepszej przyczepności i przedłuża żywotność opatrunku silikonowego.

Sposób aplikacji

- Usuń pierwszą część folii ochronnej z opatrunku silikonowego i delikatnie umieść go na jednym końcu blizny.
- Usuń drugą część folii ochronnej i delikatnie przyklej pozostałą część opatrunku silikonowego na bliznę.

Pielęgnacja w celu utrzymania właściwości opatrunku

Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE T jest jednorazowym opatrunkiem, który od momentu aplikacji może pozostawać na bliznie aż do czasu utraty właściwości adhezyjnych (przyczepności).

Jak długo trwa leczenie BAPSCARCARE T?

BAPSCARCARE T można stosować tak długo, jak długo widoczne są cechy przerostu blizny, zaczerwienienie lub inne objawy opisane powyżej. Zapytaj swojego lekarza o precyzyjny plan leczenia.

Czas użytkowania

Pełne opakowanie BAPSCARCARE T zawiera 10 sztuk opatrunków silikonowych. Każdy z nich może być użytkowany przez 5 do 7 dni. Pełne opakowanie BAPSCARCARE T wystarcza na 5 do 10 tygodni leczenia.

Środki ostrożności

- Skonsultuj się z lekarzem w razie wystąpienia podrażnień skóry lub innych problemy skórnych.
- Opatrunki silikonowe są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opatrunki silikonowe można stosować wyłącznie po zakończeniu procesu gojenia, nie wolno stosować ich na otwarte rany.

Działania niepożądane

Jak dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Przechowywanie

Termin ważności nadrukowano na opakowaniu. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C.

Data ostatniej wersji instrukcji stosowania listopad 2016



BAP Medical BV, NL, 7324 BT,
Laan Van De Maagd 119,
Apeldoorn.
MADE IN BELGIUM

